



Fassungsvermögen 9 Liter, Ablassventil, leicht entnehmbare Gipsfangbehälter mit Tragebügel.

Die durchdachte Konstruktion aus rostfreiem Edelstahl ist geeignet für die Montage mit Links- oder Rechtsseitigem Abfluss.



Falls keine Wandmontage des Gipsabscheiders möglich ist, steht diese stabile Halterung aus 40 mm Aluminiumprofilen optional zur Verfügung!

DER CLEVERE GIPSABSCHEIDER AUS ROSTFREIEM EDELSTAHL

Zum Einsatz in Dentallaboren und Zahnarztpraxen in Untertischmontage. Die Gipsfanganlage wird unter dem Abfluss anstelle eines Siphons nur einmalig montiert und verhindert nachhaltig Geruchsbildung, ein großer Vorteil gegenüber einfacheren Systemen. Der Gipsabscheider scheidet durch lange Verweildauer und Zyklontechnik im Behälter ungelöste Schwebstoffe wie Gips zuverlässig ab. Der Gipsabscheider verhindert, dass es zu einer Sedimentierung in der nachfolgenden Leitung kommt. Bei anderen Systemen aus Kunststoff wird zum Teil ausdrücklich vor der Einleitung von seifenhaltigen Abwässern gewarnt. Bei diesem Abscheider müssen Sie sich keine Gedanken darüber machen ob diese Einschränkung praxisgerecht ist.

Die Ablaufrichtung ist Rechts- oder Linksseitig möglich. Die Anschlussmaße sind für den Zulauf 1½" IG und für den Ablauf 1½" AG. Das große Behältervolumen von 13 Liter ermöglicht komfortable Wechselintervalle.

Einfache und hygienische Handhabung: Nach dem Ablassen des überstehenden Wassers durch das integrierte Ablassventil lösen Sie den Bügelgriff mit einem Handgriff. Mit dem Bügelgriff können Sie den Auffangbehälter leicht transportieren. Besonders praktisch ist, dass Sie keine Verbrauchsteile (wie Tüten) oder Zubehörteile (wie Pumpen) für die Entleerung benötigen. Der Edelstahlbehälter ist leicht zu reinigen.

Baumann Dental GmbH
Frankenstr. 25
75210 Kelttern – Deutschland
fon: +49(0) 72 36-933 69 0

info@baumann-dental.de
www.baumann-dental

